


# Update procedure voor DayClock 7

Deze updateprocedure is voor een DayClock 7 met onderstaand logo op de achterkant.

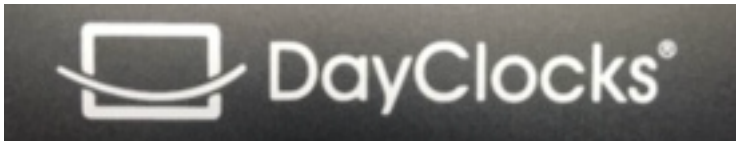

Opmerking: soms moet u het scherm omhoog of omlaag vegen om een optie te vinden.

1. Gebruik de optie met drie vingers om het menu DayClock "Instellingen" te openen.
2. Druk op "Test". Gebruikersnaam en wachtwoord moeten geldig zijn.
3. Veeg vanuit dit DayClock menu het scherm naar beneden en selecteer het "tandwiel" .
4. Selecteer "Apps en meldingen".
5. Selecteer "Geavanceerd".
6. Selecteer "Standaard-apps".
7. Selecteer "Startscherm-app".
8. Selecteer "Launcher3".
9. Selecteer de cirkel ⊙ op de onderste menuregel.
10. Selecteer het "Chrome" icoon.
11. Voer de onderstaande URL op de bovenste regel in.
12. "https://bit.ly/2yvV3o2" en selecteer de rechterpijl (Enter).
13. Wacht tot het downloaden is voltooid.
14. Selecteer "installeren" en "Gereed".
15. Veeg nu het scherm naar beneden en selecteer opnieuw de "tandwiel".
16. Selecteer "Apps en meldingen".
17. Selecteer "Geavanceerd".
18. Selecteer "Standaard apps".
19. Selecteer "Startscherm-app".
20. Selecteer "Clock".
21. Druk op de cirkel ⊙ op de onderste menuregel.
22. U heeft nu de laatste update.
23. Uiteindelijk moet u de app via de uitlog optie uit- en opnieuw inloggen om deze te synchroniseren met de DayClock.

[www.dayclocks.nl](http://www.dayclocks.nl)

info@dayclocks.nl